

Förenklat handhavande

LWA



Vågen är anpassad för att väga djur som annars har en tendens att inte vara stilla så viktvärdet enkelt kan läsas av.

Placera djuret på vågen, vågen låser viktvärdet när det är stabilt. Och påverkas inte av mindre rörelser från djuret.

Funktionsknappar

ON/OFF

Stäng av/på vågen

ZERO

Nollställer vågen

TARE

Tarerar vågen

UNIT

Ändrar viktenhet

Uppstart och vägning utan tara

1. Placera vågen på stabilt underlag och i "våg".
2. Starta vågen via "ON/OFF".
3. Vågen ska visa 0.00 i viktdisplayen annars tryck "ZERO".
4. Om vågen inte visar 0.00 i displayen tryck "TARE".
5. Påbörja vägning.



Vägning med tara

6. Placera behållare på vågplattan och tryck "TARE".
7. Påbörja vägning.
8. Ta bort tara genom att trycka på "TARE" utan taravikt på vågen.

Växla mellan vikt enheter

9. När önskad vikt är uppnådd, tryck på "UNITS".
(Man kan växla mellan följande enheter; kg - lb)

Avstängning av batteri-spar funktionen

10. Håll inne "ZERO" när vågen startas och tryck sedan "TARE" tre gånger innan "ZERO " tangenten släpps. (AOFF visas i displayen.)
11. Tryck på "UNITS" en gång. (Tid till avstängning i sekunder visas)
12. Tryck på "TARE" för att välja tid i sekunder innan avstängning.

Man kan välja mellan följande, 120 - 180 - 300 - OFF.

(OFF = Kontinuerlig drift)

13. Spara genom att trycka på " ZERO ".
14. Avsluta genom att stänga av och slå på vågen

Batteri

Typ: 7,4 V 1300mA LI-JON


Antal: 1

Byta batteriet:

1. Vänd på vågen, ta bort batteriluckan.
2. Byt ut till nytt batteri.

Var noga med att +/- polerna sitter åt rätt håll.

3. Sätt tillbaka batteriluckan.

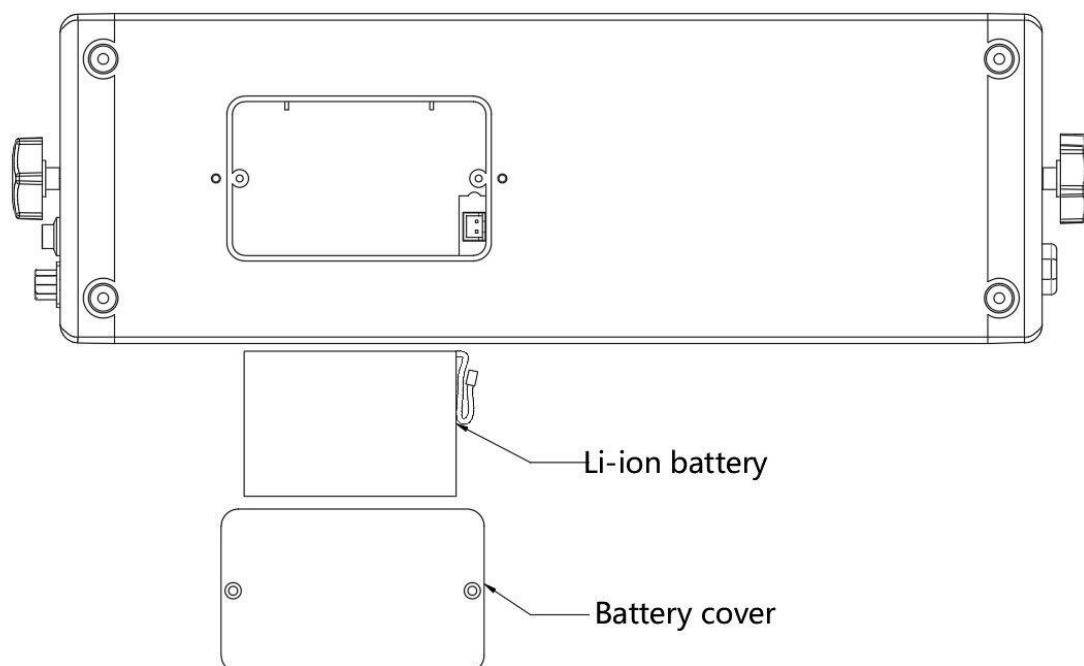

Den överkorsade soptunnan betyder att elektronisk utrustning och batterier inte får slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall.